


łuki twarzowe **CORSOFIX**[®]

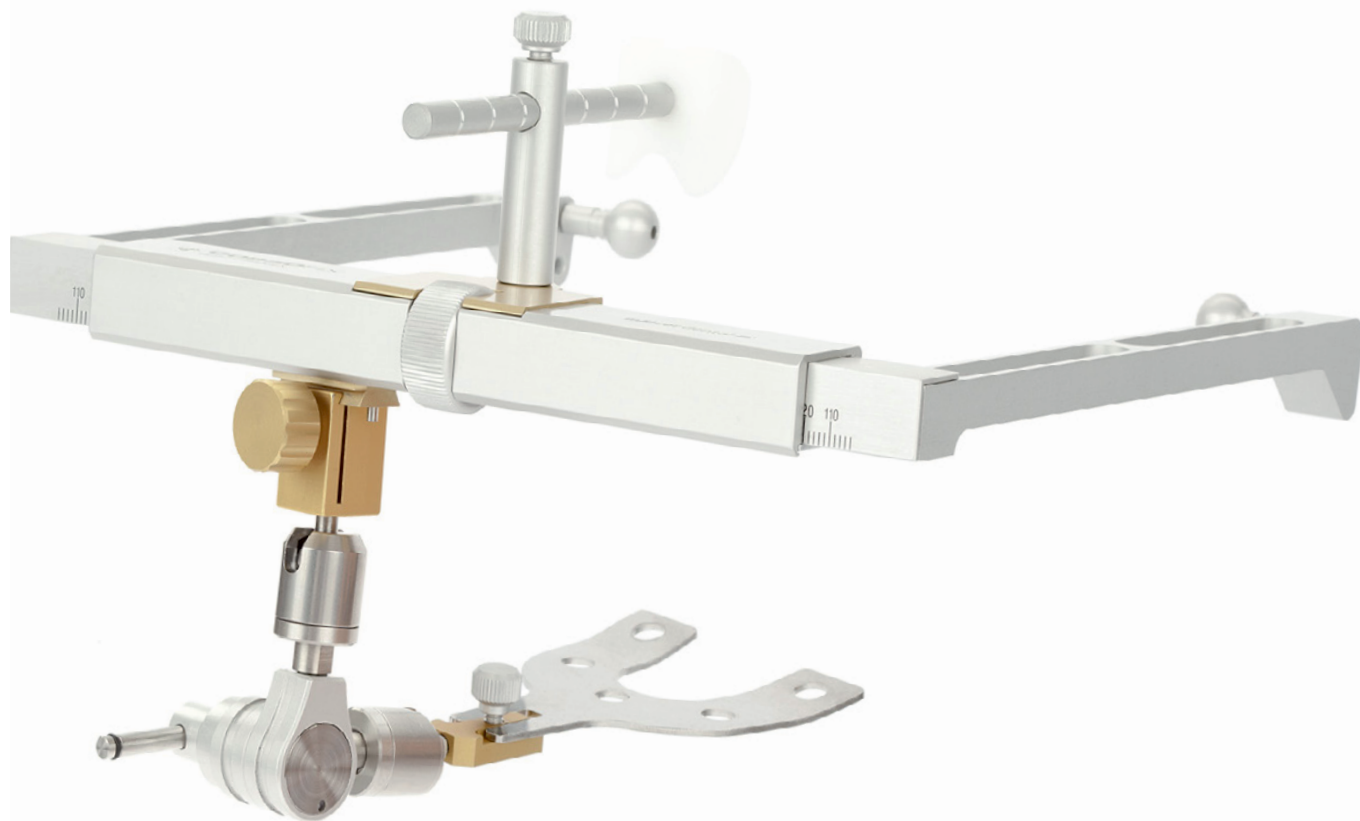


transfer w relacji...

Diagnostyka funkcjonalna pozwala osiągnąć maksymalny poziom precyzji i dopasowania. Praca z wykorzystaniem kompletnego systemu stanowi warunek wykonania modelu o najwyższej jakości.

Łuk twarzowy CORSOFIX® A kompletny z suportem przegubowym

→ Kompatybilny z łukiem twarzowym Rotofix® firmy AmannGirrbach

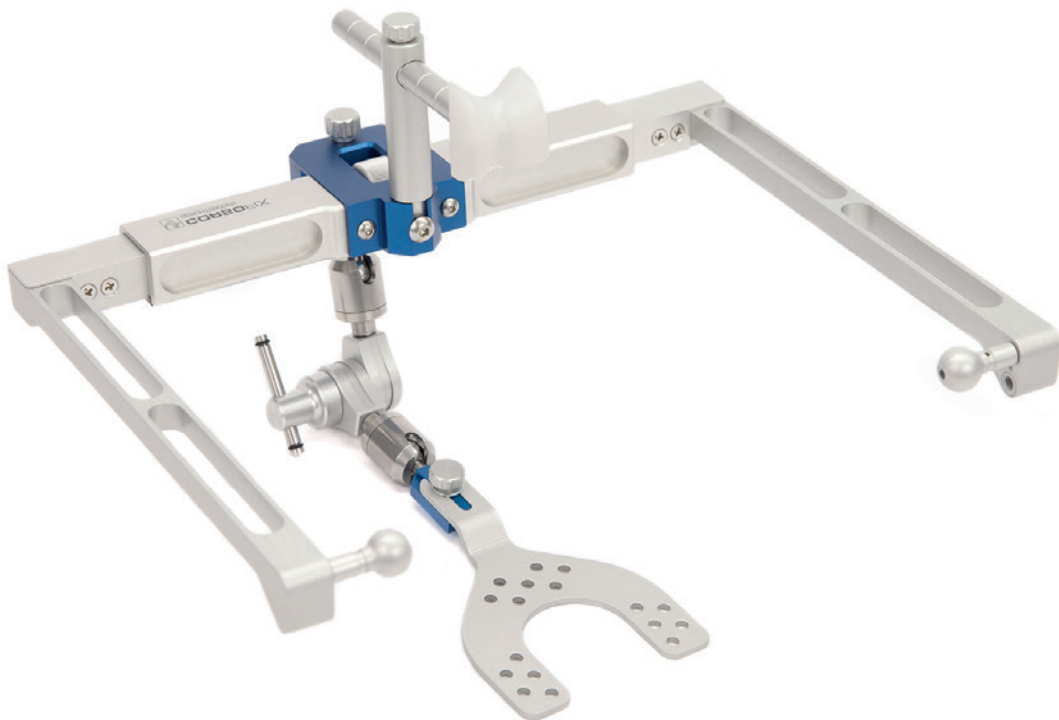


Walizka transportowa CORSOFIX® A

→ z wkładką piankową do bezpiecznego transportu łuku twarzowego



Łuk twarzowy CORSOFIX S kompletny ze wspornikiem widelca zgrzyzowego

→ Kompatybilny z łukiem twarzowym Axiomatic® producenta SAM®

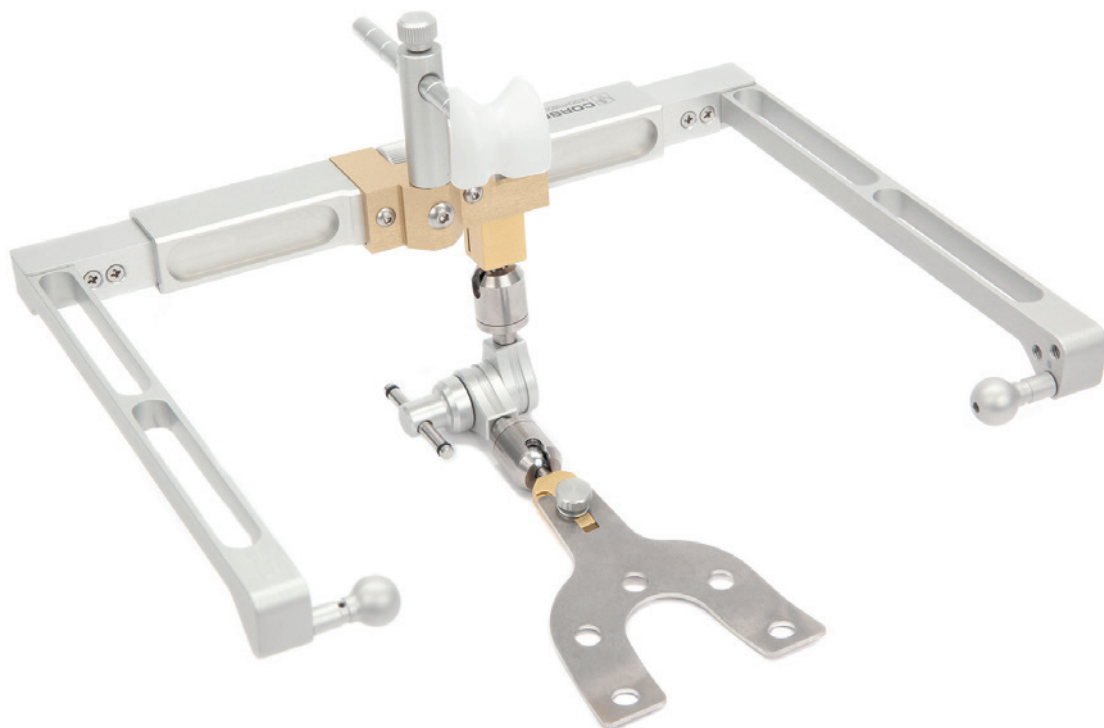

Walizka transportowa CORSOFIX® S

→ z wkładką piankową do bezpiecznego transportu łuku twarzowego





CORSO FIX

GESICHTSBÖGEN




Łatwa obsługa



1 Przygotować łuk twarzowy, jak pokazano na ilustracji.



2 Widelec zgryzowy z lekko podgrzanym termoplastem wsunąć buzi pacjenta.

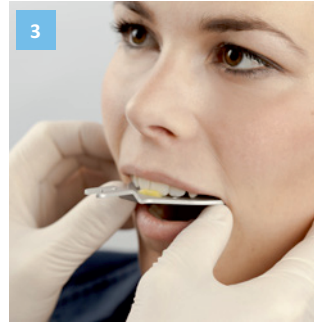

3 Widelec zgryzowy przyłożyć do zębów górnej szczęki i lekko docisnąć. Metal nie może dotykać do zębów.



4 Łuk twarzowy rozsunąć na szerokość twarzy pacjenta i przystawić do twarzy.



5 Oliwki uszne łuku twarzowego przystawić na wysokości zewnętrznego kanału słuchowego, a następnie zsunąć łuk twarzowy. Za pomocą osiowej śruby środkowej dokonać precyzyjnej regulacji.



6 Podpórkę do nosa dosunąć lekkim dociśnięciem do gładziny i unieruchomić w ustalonym położeniu za pomocą śruby mostkowej.



7 Przegub z mocowaniem widelca zgryzowego nasunąć na widelec zgryzowy i unieruchomić. Dokręcić pokrętko, by zachować tę pozycję na pacjencie do przeniesienia na artykulator.



8 Ustawiony i unieruchomiony łuk twarzowy po niecałych dwóch minutach.



9 Lekkie pociągnięcie za oba boki pozwala łatwo wyciągnąć łuk twarzowy z kanału słuchowego pacjenta. Jednym uchwytem zdejmuje się jednocześnie przegub z rejestratorem zgryzu.



10 Rejestrator zgryzu mocuje się na stoliku transferowym z gipsem. Zapewnia to bezpieczny transport do laboratorium.